

## Gebrauchsinformation

### Produkt

Name: Viawant Black Star

Artikelnummern: 110201 (Größe S), 110301 (Größe M), 110401 (Größe L), 110501 (Größe XL)

Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Richtlinie 93/42/EWG

PSA-Kategorie: Kategorie III - geeignet zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen

Gesundheitsschäden nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425

### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42 EWG geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.

Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

**CE 2777** = Benannte Stelle ist verantwortlich für die EU Baumusterprüfung und Kontrolle der fortlaufenden Konformität. (SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irland)

| Chemikalien                                      | Durchbruchzeiten | Level |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|
| <b>K</b><br>Natriumhydroxid 40 %                 | > 480 min        | 6     |
| <b>T</b><br>Formaldehyd 37 % in<br>Methanol 10 % | > 480 min        | 6     |
| <b>P</b><br>Wasserstoffperoxid<br>30%            | > 30 min         | 2     |

| Chemikalien                                      | Degradation<br>(Mittelwert) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>K</b><br>Natriumhydroxid 40 %                 | - 25,6 %                    |
| <b>T</b><br>Formaldehyd 37 % in<br>Methanol 10 % | + 3 %                       |
| <b>P</b><br>Wasserstoffperoxid 30%               | + 17 %                      |



## Warnhinweis für den Anwender

Die Handschuhe sowie die für die Erzeugung verwendeten Rohmaterialien sind für den Verwender bei sachgemäßer Verwendung harmlos. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung immer den Handschuh auf mögliche mechanische Beschädigung, z. B. Löcher oder Risse. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Handschuh seinen momentanen Schutzerfordernissen entspricht. Diese Handschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

## Einsatzbereich

Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

## Gebrauchsanweisung:

Entnehmen Sie den Handschuh aus der Verpackung und ziehen Sie ihn gleichmäßig über die Hand. Vermeiden Sie dabei übermäßigen Zug am Handschuhschaft, um Rissen und Beschädigungen vorzubeugen. Beachten Sie bitte beim Ausziehen, dass mit gefährlichen Substanzen kontaminierte Handschuhe nicht mit bloßer Hand abgezogen werden sollen.

## Transport/Lagerhinweise:

Diese Handschuhe sind bei 10 bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung zu lagern und vor Hitze, starker Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon zu schützen. Sie sind bei sachgemäßer Lagerung mindestens fünf Jahre haltbar. Verpackte Handschuhe sollen im Original-Transportkarton transportiert werden.

## Entsorgungshinweise

Die benutzten Handschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Gebrauchte Handschuhe sind nach Kontakt mit Chemikalien entsprechend der Entsorgungsvorschriften für die Chemikalie zu entsorgen.

## Gesundheitsrisiken:

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.