

## Gebrauchsinformation

### Produkt

Name: Viawant Latex Pro

Artikelnummern: 80101 (Größe XS), 80201 (Größe S), 80301 (Größe M), 80401 (Größe L), 80501 (Größe XL)

Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Richtlinie 93/42/EWG

PSA-Kategorie: Kategorie I - geeignet zum Einsatz bei geringfügigen Risiken nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425

### Warnhinweis für den Anwender

Die Handschuhe sowie die für die Erzeugung verwendeten Rohmaterialien sind für den Verwender bei sachgemäßer Verwendung harmlos. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung immer den Handschuh auf mögliche mechanische Beschädigung, z. B. Löcher oder Risse. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Handschuh seinen momentanen Schutzerfordernissen entspricht. Diese Handschuhe sind nur geeignet zum Einsatz bei geringfügigen Risiken und gehören der PSA Kategorie I an. Darf nicht als Chemikalienschutz benutzt werden. Diese Handschuhe enthalten Latex, welches allergische sowie anaphylaktische Reaktionen auslösen kann.

### Einsatzbereich

Geeignet für leichte Hygieneanwendungen ohne besondere mechanische Beanspruchung. Schutz gegen minimalen Risiken.

### Gebrauchsanweisung:

Entnehmen Sie den Handschuh aus der Verpackung und ziehen Sie ihn gleichmäßig über die Hand. Vermeiden Sie dabei übermäßigen Zug am Handschuh, um Rissen und Beschädigungen vorzubeugen. Beachten Sie bitte beim Ausziehen, dass mit gefährlichen Substanzen kontaminierte Handschuhe nicht mit bloßer Hand abgezogen werden sollen.

### Transport/Lagerhinweise:

Diese Handschuhe sind bei 10 bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung zu lagern und vor Hitze, starker Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon zu schützen. Sie sind bei sachgemäßer Lagerung mindestens drei Jahre haltbar. Verpackte Handschuhe sollen im Original-Transportkarton transportiert werden.

### Entsorgungshinweise

Die benutzten Handschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

### Gesundheitsrisiken:

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.